

### 持ちやすさを追求したレンズ枠

レンズ外枠には、心地よい握り感をもたらすディンプルとローレット加工を施しています。



### レンズケース(標準付属品)

ケース表面の素材は手になじむソフトレザーです。



### スリットランプ用78D、90Dレンズの使い方

スリット光の高さは、患者の瞳の拡張範囲を超えないこと。

照明部  
(10~20度ずらします)


フィルター選択(IR熱線吸収フィルター使用)  
スリット照明用高さ調整

倍率セレクター

センタリングノブ:  
彩度が良くて反射のない画像が  
得られるよう、タワーの中心をずらしたり、  
回転させることができます。

ジョイスティック

スリット幅調整つまみ

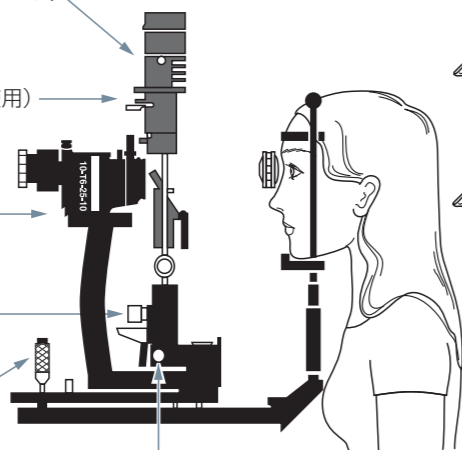

眼底観察用のワイド周辺照明

局所変化  
(視神経乳頭、腫瘍、剥離、陥没など)  
観察用の狭幅スリット照明

### ご注意

#### 滅菌方法について

- 洗 浄: アルコールで洗浄してください。
- 消 毒: 2%のグルタルアルデヒドに25分間浸透してください。  
次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤)を水で10:1に希釈し、25分間浸透してください。
- 滅 菌: エチレンオキサイドガスで滅菌を行い、50℃~60℃でエアレーションを行ってください。
- 禁 止: オートクレーブ滅菌、煮沸滅菌、プラズマ滅菌は行わないでください。



### 安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

このカタログは2013年8月現在のものです。製品の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。



製造販売元

### 株式会社ライト製作所

〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前45番地の1  
TEL (022) 359-2711 FAX (022) 359-3413  
本社・営業 〒174-8633 東京都板橋区前野町1丁目47番3号  
TEL (03) 3960-2275 FAX (03) 3960-2285  
ホームページ: <http://www.righton-oph.com>  
Eメール: [eigyousitsu@rightmfg.co.jp](mailto:eigyousitsu@rightmfg.co.jp)

サービス

### 株式会社東北ライト製作所

〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前45番地の1  
TEL (022) 359-3113 FAX (022) 359-3213

国内総代理店(眼科市場)



### 株式会社 JFCセールスプラン

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4  
明治安田生命本郷ビル  
TEL (03) 5684-8531 FAX (03) 5684-8533  
大 阪 支 店 TEL (06) 6271-3341 FAX (06) 6271-3345  
名 古 屋 営 業 所 TEL (052) 261-1931 FAX (052) 261-1933  
福 岡 営 業 所 TEL (092) 414-7360 FAX (092) 414-3463

医療機器届出番号: 倒像レンズ 04B3X10001000020

(1308-02)TI



# 倒像レンズ

日本のドクターのために復活した  
日本の技術を継承したガラス倒像レンズ





# 伝統復活！

日本人の細やかな感性にマッチする抜群の使用感、

日本人の手にジャストフィットするサイズ。

多くのドクターの「毎日使うものは良いものを」のご要望にお応えすべく、

日本製倒像レンズの技術が、厳選された製品ラインで復活を遂げました。

・非球面アプラナート (Aplanat) 設計を採用しているので均一に照明され、収差の無い眼底像が観察できます。

## 14D 20D

- クリアで明るい像
- 広めの有効径
- 広帯域の反射防止マルチコーティングを採用
- 視野周辺まで歪みがない眼底像
- 指にぴったりフィットする金枠加工

## 78D 90D

- 使いやすい作動距離
- 広い視野
- スリットランプにマッチしたシャープな像
- 疲れない握り感
- 広帯域の反射防止マルチコーティングを採用

環境に配慮した素材、製法を用いています。



## 14D 倒像鏡用

有効径	焦点距離	中心厚	視野	作動距離	質量
52mm	71.4mm	12mm	35°	77mm	60g

・非球面レンズ



## 20D 倒像鏡用

有効径	焦点距離	中心厚	視野	作動距離	質量
49mm	50mm	14.5mm	45°	50mm	59g

・非球面レンズ



## 78D スリットランプ用

有効径	焦点距離	中心厚	視野	作動距離	質量
24mm	12.8mm	10.5mm	60°	8.0mm	23g

・両面非球面レンズ



## 90D スリットランプ用

有効径	焦点距離	中心厚	視野	作動距離	質量
21mm	11.1mm	10mm	60°	6.0mm	19g

・両面非球面レンズ