

GOLDMANN CONTACT LENS

コンタクトレンズ

取扱説明書

取扱上の注意



1. 本器のご使用は医師に限定して下さい。
 2. 本器はご使用前に必ず消毒処理を施して下さい。
 3. 取扱説明書中の注意事項は、必ず熟読して下さい。
 4. オートクレーブ、煮沸消毒、放射線滅菌、EOG 滅菌は本器に損傷を及ぼすので、行なわないで下さい。
 5. アセトン、高濃度アルコールはコーティングに損傷を及ぼすので、ご使用にならないで下さい。
 6. 本器は、高温（最高 70℃）により材質が損傷を受けます。
 7. 本器の誤った取扱いによる人眼及び本器の損害、損傷に対して一切の責任を負いかねます。
 8. 本器の素材は僅かに吸湿性がある為、1 時間以上消毒液等の液体に浸さないで下さい。
- <以下は、レーザ用コンタクトレンズの付記>
9. ご使用にあたり、スリットランプ及びレーザ光凝固装置の取扱説明書を熟読して下さい。

I. 使用目的

本器は、人眼の検査診断およびレーザ治療に使用するコンタクトレンズです。目的以外には使用しないで下さい。

禁 忌



下記の症状を有する被検者は、コンタクトレンズによるレーザ治療には適しません。

1. 角膜上皮あるいは内皮にダメージがある。
2. 角膜に炎症がある。
3. 角膜が細菌やウイルス等に感染している。
4. 眼球に貫通外傷がある。

II. 使用方法

1. コンタクトレンズが目的に合ったものであること、清浄であることを確認して下さい。
2. コンタクトレンズに傷、ひび割れ等のダメージが無い事をスリットランプを用いて確認してください。特に被検者側接触面にダメージが認められますと被検者の眼を傷つけたり、薬液の角膜への接触の可能性が高まり危険です。この場合は直ちに取扱いを中止して下さい。
3. 光学部には触れないようにレンズを保持し、角膜上皮に接触する面にメチルセルロースを点入します。



注意：

コンタクトレンズを使用するときは、必ずメチルセルロースを使って下さい。

- 4.被検者の眼に装着します。角膜とレンズの間に空気が入った場合は、気泡を抜きます。
- 5.使用後は直ちに汚れ等付着物を洗い流して下さい。

Ⅲ. 消毒と保存方法

1. 流水下でメチルセルロース等の付着物を洗い流します。
30秒～60秒
2. コンタクトレンズのモデルに対応した下記消毒薬にて消毒を行います。
注意：10分間を超える長時間の消毒はコンタクトレンズ損傷の原因になることがあります。
3. 滅菌水もしくは清潔な水で消毒薬を洗い流して下さい。
10分～最高60分まで
4. 清潔で乾いた柔らかい布もしくは紙で水分を拭き取ります。
5. 清潔で乾燥した保管箱で保存して下さい。

[コンタクトレンズの消毒薬]

下記の消毒液の濃度及び浸漬時間についてはコンタクトレンズとの適合性をスイス本国で確認済ですが、これ以外の本邦において市販されている消毒薬品については確認がとれていません。



注意：

市販されている消毒薬品の選択は、目的とする消毒効果を優先してご選択下さい。
尚、使用する薬品についての濃度及び浸漬時間、洗浄時間等、詳しくは当該薬品の添付文書及び取扱説明書を参照して下さい。
使用する薬品と使用条件によってはコンタクトレンズの寿命を短くすることもあります。

コンタクトレンズモデル： 603/ 901/ 902/ 903/ 904/ 905/ 906/ 907

消毒液：次亜塩素酸ナトリウム 0.05%

製品例：次亜塩6%[ヨシダ] (吉田製薬)

コンタクトレンズモデル：

630L/ 903 L/ 906 L/ 907L/ Retina45L/ CGAL/CGIL/ CGPL/ CGRL/ CGVL

消毒液：グルコン酸クロルヘキシジン 0.2～0.5%

製品例：ヒビデン (住友薬品)

コンタクトレンズモデル：

603/ 901/ 902/ 903/ 904/ 905/ 906/ 907/ 630L/ 903 L/ 906 L/ 907L/
Retina45L/ CGAL/CGIL/ CGPL/ CGRL/ CGVL/ 1210

消毒液：過酸化水素 3%

管理医療機器 医療機器認証番号 16300BZY00270000

取扱説明書改訂年月日 2009年8月19日
取扱説明書改訂年月日 2009年5月13日
取扱説明書改訂年月日 2007年12月18日
取扱説明書改訂年月日 2007年3月1日

*仕様及び外観は、改良の為予告なしに変更する場合があります。

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18(ROHA-JFCビル) ☎03(3815)2611
大阪/〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-4-15(SC明筋本町ビル) ☎06(6262)1099
URL: <http://www.japanfocus.co.jp>

製造元 Haag-Streit AG, Bern, Switzerland

総発売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷4-3-4(明治安田生命本郷ビル) ☎03(5684)8531(代)
大阪 ☎06(6271)3341 名古屋 ☎052(261)1931 福岡 ☎092(414)7360
URL: <http://www.jfcsp.co.jp>