


メジャリングプリズムの使用期間について

いつもハーグストレイト社の「ゴールドマン アプラインションメーター用メジャリングプリズム」をご愛用頂き誠に有難うございます。ハーグストレイト社は、メジャリングプリズムを安全にご使用頂ける有効期限（製造日より5年間）を設け、且つ使用期間は最長2年に留めるようにと強調しています。ご使用になる消毒液の種類や濃度・患者数・取扱方法など様々な要素があるため、使用回数または安全に使用できる期間を一概に定めることはできませんが、同社は多数の施設での実績を精査した結果、この期間を推奨しております。


ハーグストレイト社はこれを徹底するため、メジャリングプリズム本体に有効期限を印字しています。



有効期限（砂時計のマーク  の後に西暦年-月）が印字されています。

注）上記以外のマークが印字されている場合はお問い合わせ下さい。

- 有効期限を過ぎたら使用しないで下さい。ハーグストレイト社は**有効期限までの最長2年間の使用を推奨**しています。
- 使用期間は、最初に使用した時から始まります。
- 使用期間は、取扱説明書に記載されている指示に従って正しく使用されている場合に適用されます。「ゴールドマン アプラインションメーター用メジャリングプリズムの取扱いについて」を参照して下さい。
- 使用期間内であっても、キズもしくはクラックのついたものは直ちに廃棄して下さい。廃棄の際は、医療廃棄物として各自治体の指示に従い適正に処理して下さい。

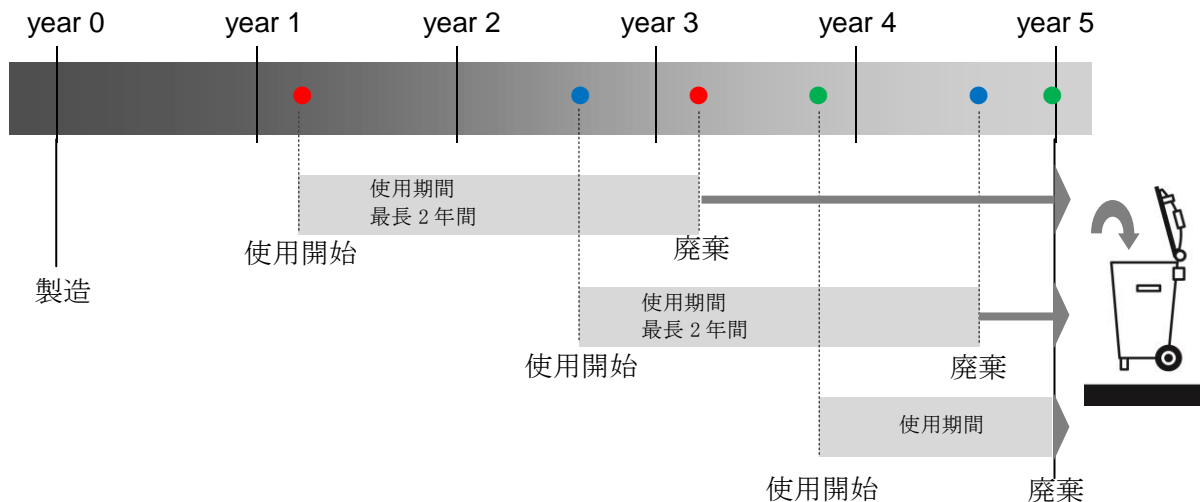

使用期間が2年に満たなくても、有効期限が過ぎたら廃棄



® 株式会社 JFCセールスプラン 営業部
 本 社 / TEL03-5684-8531 大 阪 / TEL06-6271-3341
 名古屋 / TEL052-261-1931 福 岡 / TEL092-414-7360

ジャパン フォーカス(株) JFCテクノクラート
 本 社 / TEL03-3815-1995 大 阪 / TEL06-6262-1099