

ハーグストリート社スリットランプ  
～あご台、本体操作ノブ及びジョイスティック（ラバーなし）～  
ご使用後の消毒について

ご使用後のスリットランプを消毒する際、以下の要領で行って下さい。

Haag-Streit 社製スリットランプのあご台、本体操作ノブ及びジョイスティック（ラバーなし）は、必要に応じて、70%エタノールの消毒用ワイプあるいは70%エタノールを含ませた柔らかく少し湿った糸くずの出ない布で優しく消毒して下さい。

また、以下の点を遵守下さりますようお願い申し上げます。

- ・決して直接アルコールを吹き付けしないで下さい。
- ・本消毒方法はあご台、本体操作ノブ及びジョイスティック（ラバーなし）のみ適用されます。
- ・眼圧計の測定プリズムには適用されません。
- ・塗装部及びスリットランプ本体（特に光学系）には適用されません。
- ・液体が装置に浸透しないよう、消毒薬は過分にせず、必要な場合は使用前に布を絞って下さい。（布は消毒液で液が垂れるようなヒタヒタな状態にしないようお願い申し上げます。）
- ・本品は液体の侵入に対し、特に保護されていないIPX0商品です。
- ・70%エタノール以外 例えば、次亜塩素酸、過酸化水素などは使用しないで下さい。

（お願い）

弊社スリットランプ用にチンレストペーパーとプレスシールドをご用意しております。感染症対策に本品をお勧めしております。

ジャパンフォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03)3815-2611